

# “華宇”主動式負壓導尿套(未滅菌) 中文說明書

## 型號:TrueClr Pediatric M(小兒男性)

### 步驟 1: 確認適合您的導尿套型號

1. 華宇主動式負壓導尿套Pediatric M(適用於小兒男性)。
2. 導尿套建議搭配使用的抽吸器幫浦:戴爾貝斯 DeVilbiss抽吸器幫浦型號:7314P-D, 或是醫護中心牆面式抽吸裝置或是其它符合要求之抽吸裝置。
3. 醫用含碘棉棒(如有需要可使用)與手套 (如有需要可使用)。

操作教學影片網址:

<https://vimeo.com/823874271?share=copy>

### 步驟 2: 準備

1. 使用肥皂與清水清洗雙手, 穿戴個人的防護裝備像是手套(如有需要可使用)。
2. 將幼兒放在舒適、平坦的表面上。請勿讓幼兒獨自留在那裡。
3. 使用含碘棉棒清潔陰莖(包含包皮的下方, 如果有的話)。
4. 調整抽吸器到最低的吸力。
5. 將主動式負壓導尿套遠端的管子連接到抽吸器幫浦的尿液收集瓶上。
6. 將抽吸器幫浦的電源打開。

### 步驟 3: 穿戴

1. 將主動式負壓導尿套軟膠部分向外翻(如圖1)。
2. 用一隻手握好陰莖。
3. 使用另一隻手, 將已翻好的主動式負壓導尿套套入陰莖, 並將外翻的導尿套部分套回陰莖上, 至少套住1英吋(約2.54公分)的陰莖(如圖2)。
4. 如果病患包皮包圍陰莖, 則導尿套至少需套住1.5英吋(約3.81公分),
5. 調整抽吸器幫浦的吸力, 調整到最適合的導尿效果與病患舒適度, 請勿超過130毫米汞柱的壓力。
6. 吸引了一些時間後, 尿液將開始透過負壓導尿被導流到集尿瓶中(如圖3)。

### 步驟 4: 移除

1. 當尿液不再導流出來時, 請再等30秒鐘的時間。
2. 取下主動式負壓導尿套時, 將手指插入導尿套和陰莖之間以創造一個空隙。小心地將導尿套從陰莖上拿下來(圖4)。
3. 關閉抽吸器幫浦的電源。
4. 使用後, 務必清潔並乾燥病患與導尿套接觸的部位。
5. 記得記錄尿量、日期和時間。
6. 取下集尿瓶。按照生物安全和感染控制協議和標準處理尿液。
7. 使用肥皂和水清洗集尿瓶。
8. 使用肥皂和水清洗導尿套, 然後晾乾。
9. 每 4-6 小時或根據您的醫療專業人員的建議排空膀胱。

### 問題處理

問題	可能的原因
吸力不足	• 集尿瓶蓋子沒有蓋緊
	• 抽吸器幫浦吸力設定過低
	• 管路沒有恰當的連接
	• 管路彎折到, 或是管路內堵塞

### 導尿套所有的零組件請作為感染性廢棄物處理

為避免交叉感染, 請遵循您的醫療機構制定的感染控制政策。

暴露於極端高溫或低溫可能會影響導尿套的顏色, 但不會影響其功能。

患者洗澡時請勿使用。在使用過程中請勿將其掉入水中或其他液體中。

導尿套所有零組件均不含乳膠。

保存條件: 5°C~34°C保存。

建議連續穿戴兩天後清洗產品一次, 醫院使用建議15天後更換新品, 居家使用建議30天後更換新品。

**適應症:** 華宇主動式負壓導尿套旨在用於小兒男性患者的非侵入性尿液收集管理。

醫療器材商名稱: 華宇藥品股份有限公司


醫療器材商地址: 臺北市中山區中山北路2段115巷43號8樓

製造業者名稱: DemeTech Corporation

製造業者地址: 5980 Miami Lakes Dr, Miami Lakes, FL 33014, United States of America

衛部醫器輸壹字第023470號

製造批號: 請見原文包裝標示

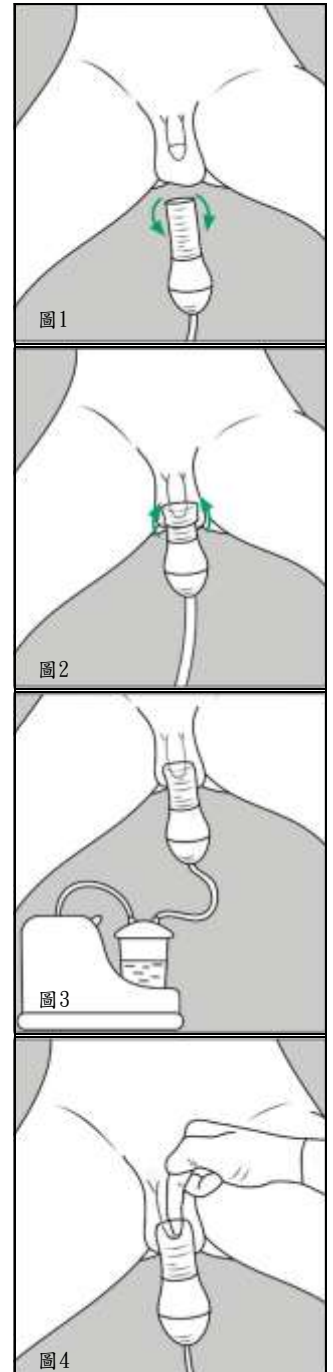

製造日期：請見原文包裝標示